



DENTIRO® Wipes

Voll viruzide Desinfektionstücher mit niedrigem Alkoholgehalt für kleine Flächen



- ▶ **Aktiv gegen 101 Keime**
- ▶ **Wirkt in 60 Sekunden**
- ▶ **Kompatibel mit mehr als 275 Materialien, inklusive Kunstleder**
- ▶ **Rückstandsfreies Trocknen**

DENTIRO® Wipes sind gebrauchsfertige Desinfektionstücher für die rückstandsfreie Desinfektion und Reinigung kleiner Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten wie Operationstischen, Tragbahnen, Infusionsständern und Behandlungsstühlen. Die stark getränkten Tücher haben einen niedrigen Alkoholgehalt von weniger als 50%, der nicht nur das Potenzial für Allergien reduziert, sondern auch die Materialverträglichkeit erhöht. DENTIRO® Wipes sind aldehydfrei und biologisch leicht abbaubar.

Anwendungsbereiche



- ▶ Zur Schnelldesinfektion und Reinigung kleiner Oberflächen von Medizinprodukten wie z.B. OP-Tischen, Absaugschläuchen, Hand- und Winkelstücken, OP-Leuchtengriffen und medizinischem Inventar aus Materialien wie Aluminium, Kupfer, Silikon, Gummi und Kunststoffen wie PVC und Acrylglas

Gebrauchshinweis



Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände vollständig benetzen und Desinfektionsmittel einwirken lassen. Einwirkzeit einhalten. Wenn erforderlich, Oberfläche oder Gegenstand mit sauberem Einwegtuch trocknen. Nur auf alkoholbeständigen Materialien anwenden. Bei empfindlichen Materialien vor Gebrauch Verträglichkeit an kleiner, unauffälliger Stelle testen.

Wirkspektrum / Einwirkzeiten



Bakterizid	15 Sekunden
Antibiotika-resistente Bakterien	15 Sekunden
Tuberkulozid	60 Sekunden
Mykobakterizid	60 Sekunden
Levurozid	15 Sekunden
Antibiotika-resistente Hefepilze	15 Sekunden
Behüllte Viren	15 Sekunden
BVDV	15 Sekunden
Coronavirus	15 Sekunden
Hepatitis-B-Virus	15 Sekunden
Hepatitis-C-Virus	15 Sekunden
Herpes-simplex-Virus	15 Sekunden
HIV	15 Sekunden
Influenza-A-Virus	15 Sekunden
Vaccinia-Virus	15 Sekunden
Unbehüllte Viren	60 Sekunden
Adenovirus	60 Sekunden
Norovirus	60 Sekunden
Poliovirus	60 Sekunden
Rotavirus	30 Sekunden

Entspricht den EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615 und den RKI-/DVV-Richtlinien. Dermatologisch getestet.





Verträglichkeit



Polyvinylchlorid	Kompatibel.
Silikon	Kompatibel.
Gummi	Kompatibel.
Aluminium	Kompatibel.
Kupfer	Kompatibel.
Messing	Kompatibel.
Acrylglas	Kompatibel.
Polyethylen	Kompatibel.
Polytetrafluoethylene	Kompatibel.
Polypropylen	Kompatibel.
Gusseisen	Kompatibel.

Achtung



H228 Entzündbarer Feststoff. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter gemäss lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusammensetzung der Tränklösung pro 100 g



31.3 g Ethanol, 16.7 g Isopropanol

Physikalische Eigenschaften



Physikalischer Zustand:	Mit Flüssigkeit getränkte Tücher
Farbe:	Farblos
Duft:	Alkoholisch
pH-Wert:	Neutral.
Haltbarkeit:	36 Monate (ungeöffneter originalbehälter)

Lieferformen



Nachfüllbeutel mit 120 Desinfektionstüchern (14.5 x 20 cm), klassischer Duft, Nachfüllbeutel mit 120 Desinfektionstüchern (14.5 x 20 cm), Zitronenduft, Nachfüllbeutel mit 120 Desinfektionstüchern (14.5 x 20 cm), Blütenduft, DENTIRO Wipes Tub T1 (Leere Dose), (CH-041079, CH-041083, CH-041084, CH-042081)